

Infūzijas sistēma MiniMed™ Mio™

MMT-923A lokanais katetrs 6mm /infūzijas caurule 60cm (rozā)

MMT-943A lokanais katetrs 6mm /infūzijas caurule 60cm (zils)

MMT-975A lokanais katetrs 9mm /infūzijas caurule 60cm (transparents)

Infūzijas sistēma **MiniMed Mio** ir vienreiz lietojama medicīniska ierīce, kas paredzēta medikamentu, tajā skaitā insulīna, ievadīšanai zemādā 90° leņķī. Infūzijas sistēmas lokanā katetra garums 6mm vai 9mm. Šai infūzijas sistēmai ir vienreizēja ievadīšanas ierīce Infūzijas sistēma jāmaina ik 48-72 stundas saskaņā ar ārstējošā ārsta ieteikumiem. Rekomendē: 9mm garā katetra kanīle - pieaugušajiem pacientiem ar normālu KMI, 6mm gara katetra kanīle - bērniem un tieviem pieaugušajiem.

Lietošanas indikācijas

Ierīce paredzēta medikamentu, tai skaitā, insulīna no insulīna pumpja, zemādas infūzijām.

Kontrindikācijas

Infūzijas sistēmas paredzētas tikai zemādas lietošanai. Tās nav paredzētas intravenozai medikamentu ievadīšanai vai asins vai asins preparātu ievadīšanai.

Brīdinājumi

Nepareiza infūzijas sistēmas ievadīšana un nepareiza infūzijas sistēmas ievadīšanas vietas apstrāde var novest pie kļūdainas medikamenta piegādes, inficēšanās un/vai ievadīšanas vietas iekaišanas.

Pirms infūzijas sistēmas ievadīšanas apstrādāt ievadīšanas vietu ar izopropilspirtu.

Pirms infūzijas sistēmas ievadīšanas noņemt kanīles drošinātāju.

Ja Jūs lietojat infūzijas sistēmu pirmoreiz, ievadiet to ārstējošā ārsta klātbūtnē.

Nepieļaujiet gaisa klātbūtni infūzijas sistēmā. Piepildiet infūzijas sistēmu pilnībā.

Biežāk pārbaudiet kanīles fiksācijas vietu, jo gadījumā, ja tā izkrīt, jūs varat nesajust sāpes. Lai medikaments tiktu piegādāts pilnā apjomā, kanīlei jābūt ievadītai visā tās dziļumā.

Ja infūzijas sistēmas ievadīšanas vieta ir iekaisusi, atvienojiet infūzijas sistēmu no ķermeņa un ievadiet jaunu infūzijas sistēmu citā vietā līdz iekaisusi vieta pilnībā atlabst.

Ja jūs konstatējat, ka infūzijas sistēmas plāksteris nav cieši piestiprinājies vai kanīle pilnībā vai daļēji izgājusi no ādas, nomainiet infūzijas sistēmu.

Mainiet infūzijas sistēmu ik pēc 48 stundām vai saskaņā ar ārstējošā ārsta rekomendācijām.

Nekad neuzpildiet infūzijas sistēmu un nemēģiniet iztīrīt aizsērējušu infūzijas sistēmu, ja infūzijas sistēma pievienota pacientam. Jūs vara nejauši ievadīt pārmērīgi lielu medikamenta devu.

Nepieļaujiet dezinficējošo vielu, dezodorantu un parfimērijas izstrādājumu nokļūšanu uz infūzijas sistēmas, jo tie var bojāt sistēmu.

Pēc vienreizējas infūzijas sistēmas lietošanas, izmetiet to saskaņā ar drošības tehnikas noteikumiem konteineros, kas paredzēti asiem priekšmetiem. Infūzijas sistēmu nedrīkst tīrīt un atkārtoti sterilizēt.

Ja iepakojums nav atvērts un tā veselums nav bojāts, ierīce ir sterila un apirogēna. Nelietojiet, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts. (Ja lietojiet insulīna pumpi Paradigm, nelietojiet infūzijas sistēmu, ja bojāta sistēmas savienotāja adata.)

Uzglabājiet infūzijas sistēmas sausā vēsā vietā. Neatstājiet infūzijas sistēmas tiešu saules staru iedarbības zonā vai automašīnā.

Infūzijas sistēmas īslaicīgas atvienošanas laikā ievērojiet aseptikas noteikumus. Konsultējieties ar ārstu par to, kā kompensēt to medikamenta daudzumu, kas netika ievadīts uz laiku atvienotas infūzijas sistēmas dēļ.

Ievadot insulīnu uzmanīgi sekojiet līdz glikozes līmeņa izmaiņām atvienojot sistēmu un no jauna pievienojot to.

Ja ievadot insulīnu glikozes līmenis paaugstinājies bez īpaša iemesla vai atskan trauksmes signāls saistībā ar nosprostojumu, pārbaudiet vai infūzijas sistēma ir vesela un/vai nav noplūde.

Aizdomu gadījumā nomainiet infūzijas sistēmu, jo kanīle var būt izkustējusies un/vai daļēji necaurejama.

Ja atgadās kāda no augstāk minētām situācijām, kopā ar ārstējošo ārstu sastādiet plānu pēc kura Jūs varat visātrāk kompensēt nesaņemto insulīnu. Lai pārliecinātos, vai problēma ir atrisināta, pārbaudiet glikozes līmeni asinīs.

Nemainiet infūzijas sistēmu tieši pirms gulētiešanas, ja nevarēsiet veikt glikozes līmeņa pārbaudi 1 – 3 stundas pēc ievadīšanas.

Atkārtota infūzijas sistēmas lietošana var novest pie kanīles/adatas bojājuma, kas savukārt var kļūt par iemeslu ievades vietas infekcijai, iekaisumam un vai neprecīzai medikamenta ievadei.

Garantija Informāciju par produkta garantiju iespējams uzzināt pie vietējiem produktu izplatītājiem vai interneta vietnē

www.medtronicdiabetes.com

www.infusion-set.com

CE 0459

Neskaidrību gadījumā, lūgums sazināties ar SIA RAL:

www.ral.lv

e-pasts: ral85@inbox.lv

Talr. +371 67 316 372